

क्रमांक/एन.एच.एम./QA/2020/7032
प्रति,

भोपाल दिनांक:- 29.05

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश
समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश
समस्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मध्यप्रदेश

विषय :- कोविड-19 उपचार हेतु ऑक्सीजन सिलेण्डर के डिस्इंफेक्शन बावत्।

उपरोक्त विषय संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड वार्ड/उपचार क्षेत्र में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेण्डर को समय समय पर गुनगुने पानी (<50°C) से साफ किया जायें तदोपरांत 70% आईसोप्रोपाईल एल्कोहल द्वारा पोछा जाये। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश अनुसार 0.1% सोडियम हाईपोक्लोराईड से ऑक्सीजन सिलेण्डर को असंकमित तो किया जा सकता है परंतु CGA एवं BCGA अनुसार 0.1-0.5 प्रतिशत तीव्रता वाले सोडियम हाईपोक्लोराईड भी मेटल सरफेस पर रिएक्ट कर Corrosion कर सकता है।

अतः उपरोक्त निर्देश अनुसार ऑक्सीजन सिलेण्डर को समय समय पर साफ व असंकमित करने हेतु निर्देश जारी करें। ऑक्सीजन सिलेण्डर क्लीनिंग कार्य की पूर्ण जवाबदेही Hospital Infection Control Committee की रहेगी।

संलग्न :- भारत सरकार द्वारा प्राप्त पत्र प्रति

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश


भोपाल दिनांक:- 29.05.20

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम./QA/2020/7033
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
2. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।

DD I.T.

Kindly upload on official Covid 19 portal
the guideline for "Oxygen Cylinder disinfection"


29/5/20

डॉ. पंकज शुक्ला
संयुक्त संचालक, क्वालिटी एश्योरेंस
एन.एच.एम. भोपाल मध्यप्रदेश

मिशन संचालक,
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश